

# GRIP STOP®



## Спрей за нос Предпазва и отпушва

Прочетете внимателно листовката, преди да използвате продукта

### 1. Какво е GRIP STOP® спрей за нос и за какво служи

GRIP STOP® спрей за нос е медицинско изделие с механично действие, препоръчан за лечение на симптомите, свързани с настинки и съпътстващите ги възпалителни състояния на носните кухини, включително и от бактериален произход.

GRIP STOP® спрей за нос подпомага за възстановяването на нормалното дишане през носа и на тръбната вентилация при възрастни и деца.

### 2. Какво трябва да се знае преди да се използва GRIP STOP® спрей за нос

Да не се използва в случай на чувствителност към компонентите на продукта (виж част 6).

### 3. Как да използвате GRIP STOP® спрей за нос

Отстранете защитната капачка, поставете палеца си върху основата на флакона, показалеца и средния пръст върху крилцата на дозатора и ги натиснете надолу. След това ги отпуснете. Повторете тази операция до постигането на първото впръскване. Наведете леко глава напред, издишайте бавно и впръснете продукта в ноздрата. Вдишайте като държите затворена другата ноздра с един от пръстите на другата ръка.

Препоръчват се две впръсквания във всяка ноздра два пъти на ден или по лекарско предписание.

GRIP STOP® спрей за нос може да се използва и при наличие на малки разранявания на носната лигавица или на кожата около ноздрите.

### 4. Предупреждения

- В случай на нежелани реакции, прекратете употребата на продукта и се консултирайте с лекар.
- Да не се поглъща.
- Да се избягва смесена употреба.
- Да се избягва контакт с очите.
- Не използвайте продукта, ако опаковката или флакона не са цялостно затворени.
- Не използвайте продукта след датата на годност, посочена на опаковката. Датата на годност се отнася за продукт с цялостна опаковка и правилно съхраняван.

### 5. Как да съхраняваме GRIP STOP® спрей за нос


- Съхранявайте далече от погледа и достъпа на деца.
- Затворете добре флакона след употреба.
- Да се съхранява при температура не по-висока от 30 °C.

### 6. Друга информация

**Състав:** D-пантенол, Дикалиев глициризинат, Лактоферин, Карбоксиметил β-глюкан, Хлорбутанол, Етилдиаминотетраацетат (ЕДТА) динатриева сол, Натриев N-хидроксиметил глицинат, Полисорбат 20, Естествени аромати, Буферен разтвор pH 7,0. **Опаковка:** Флакон 20 мл с механичен небулизатор

**Продуктът е предназначен за българския пазар.**

Произведено в Италия

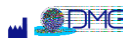

DMG Italia srl



2-11/11/2020

Ди Ем Джи България ЕООД, ул.Акад. via Laurentina Km. 26,700 Георги Бончев бл.104, вх.А, София, България.  
Pomezia (Rome) - ITALIA  
[www.dmgbg.com](http://www.dmgbg.com) [www.dmgit.com](http://www.dmgit.com)